

Arbeitsplatz / -Bereich:  
**Krankentransport / Rettungsdienst**

Tätigkeit: **Ansetzen von wässrigen Desinfektionsmittellösungen und deren Anwendung**

**Gefahrstoff**

**Routinedesinfektion  
Schlussdesinfektion**

**Perform**

**100 g enthalten: 45 g Pentakalium bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat)**  
weißes bis leicht gelbliches Pulver  
Hersteller: Schülke & Mayr GmbH, www.schuelke.com

Zum Ansetzen der Gebrauchslösung **zuerst Wasser** (möglichst handwarm) in **Eimer geben**, dann das Granulat einstreuen und kurz umrühren. **Standzeit: ein Arbeitstag**

Bei manchen Leitungswasserqualitäten kann bei Einsatz aktivsauerstoffbasierter Desinfektionsmittel ein an Chlor erinnernder Geruch entstehen. perform® enthält jedoch keine Chlor-Komponenten.

Die Gebrauchslösung kann auf sehr empfindliche Textilfarbstoffe bleichend wirken. Nicht anwenden auf Teppichbodenbelägen.



**Gefahren für Mensch und Umwelt**

- R36/38 Reizt die Augen und die Haut
- R52 Schädlich für Wasserorganismen
- S26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- S28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.

**Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln**



- Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern
- Hinweise für sichere Handhabung : Staubbildung vermeiden
- Chemikalienbeständige Handschuhe tragen (Nitril- oder Butylkautschuk)
- **Latex-Handschuhe sind nicht geeignet**
- **Beim Ansetzen der Lösung immer Schutzbrille tragen**
- Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Ggf. Schürze oder Schutzkittel als Spritzschutz tragen
- Für **ausreichende Lüftung** sorgen
- **Konzentration** nach Tabelle **einhalten**
- **Nicht für X-Wipes Spendersystem geeignet (Sauerstoffabspalter gasen aus)**



Perform	Konzentration / Konzentratmenge		
	1 %	2 %	3 %
Beutel mit <b>40 g Granulat</b>	40 g auf 4 Liter	2 x 40 g auf 4 Liter	3 x 40 g auf 4 Liter

**Verhalten im Gefahrfall**



Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen : Staubbildung vermeiden  
 Umweltschutzmaßnahmen : Nicht in Oberflächengewässer gelangen lassen  
 Reinigungsverfahren : Mechanisch aufnehmen

**Wichtige Telefonnummern:** Notfall / Rettungsdienst: **112** Betriebsarzt:  
 Vergiftungszentrale: **06131-232466**

**Erste Hilfe**



Allgemeine Hinweise :  
 Nach AUGENKONTAKT : Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen  
 Nach HAUTKONTAKT : Augen sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen, Augenarzt konsultieren  
 : Sofort mit viel Wasser abwaschen  
 : Mund gründlich mit Wasser spülen. **KEIN Erbrechen auslösen !**  
 Nach VERSCHLUCKEN :

**Sachgerechte Entsorgung**



**Einweg-Desinfektionstücher:**  
 - bei Routinedesinfektion und Kontamination (z.B. Blut): **Sattnass** im Restmüll entsorgen  
 - bei **Infektionstransport** erst **nach** der **Desinfektion** in der jeweiligen Lösung **12 Std. Einwirkzeit**

**Desinfektionsmittellösung:** In den Abfluss (Anschluss an die öffentliche Abwasserentsorgung)  
**Desinfektionsmittel-Konzentrat:** Als Sonderabfall zur Annahmestelle der Gemeinde  
**Restentleerte Verpackung:** → gelber Sack (Verpackung trägt grünen Punkt)

